

## Instructions for Use - DiaShine Fine Polish

### English:

1. Slowly rotate a bristle brush or felt in the paste at 3,000 - 5,000 RPM.
2. The paste will melt onto the rotary tool.
3. Start with a minimal amount of polish and apply light to moderate contact pressure.
4. DiaShine polish is completely water-soluble and cleans off easily.

### Czech:

1. Pomalu otáčejte štětínovým kartáčem nebo plstí v pastě rychlostí 3 000 - 5 000 ot./min.
2. Pasta se roztaví na rotační nástroj.
3. Začněte s minimálním množstvím leštidla a lehkým až středním kontaktním tlakem.
4. Leštidlo DiaShine je zcela rozpustné ve vodě a snadno se čistí.

